

金子ついに7 御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 佐藤



点検年月日	27年 7月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	000308
設置場所				TEL	025-799-2015
納入時期	15年 7月 1日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度: 95.0 %	流量: 0.75 L/min	圧力: 88~153	MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

27年 7月 7日

ご署名

金子一郎



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシパウラ
環境事業部

日付: 27年7月7日 作業者 佐藤

ONW-10機番: 000308

PSA機番: SPS-11781

客先: 金子川ニ...

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-11161)	合/否	合
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	合
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	合
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	合
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	合
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	合
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)	合/否	合
酸素濃度の確認 (運転開始から約3分後) (90%以上)	合/否	(95.0 %)
酸素流量は適切か (0.73~0.82 L/min)	合/否	(0.75 L/min)
PSA圧力の確認	参考値	(88 Mpa) ~ (153 Mpa)
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	合
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	合
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	合
ドレンチューブは接続したか	合/否	合
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	合
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	合
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れある場合清掃)	合/否	合
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	合
定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	合
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	合
確認試験		
オゾン水濃度の確認 (オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	合
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	合
インジケータの変色は良好か	合/否	合

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)