

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年8月4日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100628
作業年月日	平成27年8月4日		作業時間: 1 Hr
顧客名	窪田医院		TEL: 0258-39-3193
所在地	新潟県長岡市三和1-3-27		担当: 院長先生 様
販売店	株式会社マルタケ 長岡店		担当: 八子 様
納入年月日	平成25年8月6日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

異常なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 452
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数: 878	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 659	殺菌+アル: 1073
	リークチェック: 1	自己洗浄: 567	アルコール単独: 7	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成27年8月4日

ご署名

窪田医院
窪田 久

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町 1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

