

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 150929

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 新潟支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	長谷川医院 様		機番	300119
環営	所在地	新潟県上越市国府 4-3-14		納入日	平成 26 年 2 月 3 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 6 月 15 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 9 月 28 日

修理依頼・不具合内容

タッチパネルが起動しない


不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

不具合現象を確認しました。タッチパネルの内部回路(DC-DCコンバータ)が故障して起動しない状態でした。このためお客様の運転データが取り出せませんでした。タッチパネルメーカーに相談しましたが、回路の修理ができないためタッチパネル全体を交換して復旧しました。

写真: 交換部品一式

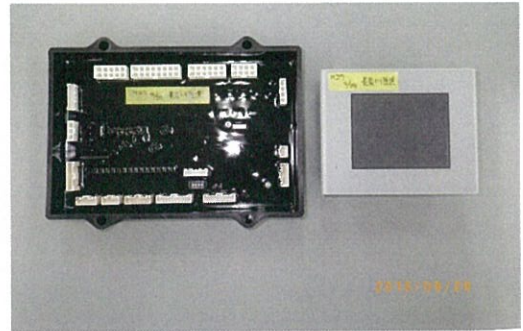

〔2〕修理・点検内容

1：部品交換（写真および下表をご参照ください）

2：運転確認・・・正常

3：出荷時の装置情報

運転プログラム: Ver. 0207/T03C

交換後運転回数: 5 消毒: 4、消毒+アルコール: 1

アルコール単独: 0、エア単独: 0

一以上一

承認

安
15.9.29
田

審査

中
15.9.29
澤

作成

H27. 9. 29

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1 台	白黒型⇒カラー型
	コントロール基板	1 枚	

(株) IHI シパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528