

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100118	
作業年月日	平成 27年11月18日		作業時間	1 h	
顧客名	しまだ医院 様		TEL	025-555-2622	
所在地	新潟県糸魚川市大字西谷内53-5		担当	様	
販売店	株式会社新潟ムトウ 様		担当	板倉 様	
納入年月日	平成22年 9月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐ (次回必委)			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期メンテナンス時期。 定期	
不具合原因、作業内容	
定期メンテナンス実施。 定期交換部品外で給水フィルター交換。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ございません。	

装置 情報	交換後運転回数: 657	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 14	殺菌+7L: 3425
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1286	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手(本体)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手(チューブ)		☒	2
脱気フィルター		☒	1	給水用フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水用フィルター		☐	1

お客様ご確認署名欄		27 年 11 月 18 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		新潟県糸魚川市大字西谷内53番地5
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		医療法人社団 長明会 しまだ医院
		ご署名 医師 島田 長 樹
		責任技術者 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町 1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	坂 27.11.18 井