

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 160223

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 新潟支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	プラーカ中村クリニック 様	機番	100308
環営	所在地	新潟県新潟市中央区笹口 1-1	納入日	平成 24 年 11 月 29 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成 28 年 1 月 20 日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 28 年 2 月 17 日

不具合内容・依頼内容

1/20 殺菌時給水異常（E:202）・・・2回発生

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果

異常は再現しませんでした。水槽内に「E-103：閉止プラグ」が落下していました。これが排水栓に引っ掛かり、給水した水が排水側に抜けて異常が発生したものと推測いたします。念のために「殺菌時給水異常」に関係する部品を交換しました。

写真：交換部品一式



〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・異常に関係する部品を交換しました。下表と写真を参照ください
- 2：運転プログラムバージョンアップ・・・Ver0103⇒0107（コントロール基板交換）
※お客様が操作するうえで、変更点はありません
- 3：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71ppm・・・正常
- 4：運転確認・・・正常
- 5：装置情報

交換後運転回数：392 殺菌：5961、殺菌＋アルコール：1757、リークチェック：1
自己洗浄：829、アルコール単独：13、エア単独：2

交換部品

部品種類	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサ（LVH）	1 個	
	水槽フィルタ 2	1 個	
	トレ－ASSY	1 枚	底部 ○→0 型
	コントロール基板（Ver0107）	1 枚	タッチパネル リスタ追加

承認



審査



作成

H28. 2. 23

中澤

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528