

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2017 - 2 - 22
発行日：平成 29年 2月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100049
作業年月日	平成 29 年 2 月 22 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	浦川原診療所 様		TEL： 025-599-2510
所在地	新潟県上越市浦川原区有島75番地		ご担当 様
販売店	株式会社 金森医科器械店		ご担当 阿部 様
納入年月日	平成 22 年 9 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期メンテナンス時期			
不具合原因、作業内容			
定期メンテナンス実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 43/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ございません。次回定期メンテナンスは平成30年2月となります。			

装置情報	交換後運転回数： / 56	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 809	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： /	自己洗浄： 489	アルコール単独： 0	エア単独： 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		2017 年 2 月 22日	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名  印	
修理業者	新鋭工業 株式会社 新潟支店 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1 TEL：025-233-0592	責任技術者	作業者
			