

保守点検・修理 報告書

管理 No. 290331-01

発行日：平成29年 3 月 31 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300814
作業年月日	平成 29 年 3 月 31 日		作業時間： / Hr
顧客名	金子クリニック 様		TEL： 025-799-2015
所在地	新潟県魚沼市田尻164-2		ご担当 様
販売店	(株)東京ダイヨー器械店		ご担当 横山 様
納入年月日	平成 28 年 3 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検時期。

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ございません。 昨年本体購入頂いた時のキャンペーン特典の為、今回の保守点検費は発生致しません。

装置情報	交換後運転回数： 206	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 16	殺菌/消毒+7L： 192
	リークチェック： 8	自己洗浄： 157	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 29 年 3 月 31 日

ご署名

金子クリニック



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者
坂井	坂井
H29.3.31	H29.3.31