

保守点検・修理 報告書

管理 No. 290926-02

発行日：平成29年 9 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300094
作業年月日	平成 29 年 9 月 26 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	吉田医院 様		TEL： 0258-31-1010
所在地	新潟県長岡市根田屋1-4-42		ご担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社 長岡支店 様		ご担当 長田 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検時期。			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検実施。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ございません。			

装置 情報	交換後運転回数： 998	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2181	殺菌/消毒+7L： 1398
	リークチェック： 4	自己洗浄： 897	7Lコール単独： 6	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29.9.26 日
新潟県長岡市根田屋1-4-42

吉田医院

ご署名 吉田 正弘 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者 作業者

