

保守点検・修理 報告書

管理 No. 300808-01

発行日：平成30年 8 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100307
作業年月日	平成 30 年 8 月 8 日	作業時間： 2.5 Hr
顧客名	刈羽診療所 様	TEL： 0257-45-3555
所在地	新潟県刈羽郡刈羽村大字刈羽	ご担当 様
販売店	株式会社マルタケ 長岡店 様	ご担当 八子 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 14 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5年以上メンテナンスを行っていない為、定期保守の実施とタッチパネル交換の提案。
定期保守をする前に排水異常発生、水槽内に水はなくなっているがずっと排水動作をして終了しない。

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施。カラータッチパネルへの交換。
コントロール基板不良の為、水槽内に水があると感知し
排水動作が終わらない事が確認できましたのでコントロール基板交換。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☐ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

部品交換後、問題箇所は改善されました。

装置情報	交換後運転回数： 102	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 103	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 182	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	カラータッチパネル		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成30年 8 月 28 日

ご署名

刈羽診療所



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者

作業者

