

保守点検・修理 報告書

管理 No. 301130-01

発行日：平成30年 11 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100629
作業年月日	平成 30 年 11 月 2 日		作業時間： / Hr
顧客名	神谷医院 様		TEL： 0258-32-0025
所在地	新潟県長岡市柏町2-6-30		ご担当 様
販売店	アルフレッサ(株) 長岡支店 様		ご担当 長田 様
納入年月日	平成 25 年 8 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守の時期の為実施。			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検実施。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 1 回/日
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.21 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ございません。			

装置 情報	交換後運転回数： 36	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 57	殺菌/消毒+7L： 123
	リークチェック： 0	自己洗浄： 104	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	カラータッチパネル		☐	1

お客様ご確認署名欄		90 年 11 月 30 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		神谷医院 印
ご署名		

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
 TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者
坂井	坂井