

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 310419-01  
発行日: 2019年 4 月 19 日

|       |                                                                                                                             |                                                                       |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       |                                                                       | 製造番号: 300814      |
| 作業年月日 | 2019 年 4 月 19 日                                                                                                             |                                                                       | 作業時間: / Hr        |
| 顧客名   | 金子クリニック 様                                                                                                                   |                                                                       | TEL: 025-799-2015 |
| 所在地   | 新潟県魚沼市田尻164-2                                                                                                               |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社東京ダイヨー 様                                                                                                                |                                                                       | ご担当 横山 様          |
| 納入年月日 | 2016 年 3 月 29 日                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 3 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守の時期の為実施。

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施。

点検項目

|          |    |                                     |              |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数        |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.76 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    | <input type="checkbox"/>            |              |    | <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ございません。

|      |              |                                                      |            |               |
|------|--------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 186 | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌/消毒: 22  | 殺菌/消毒+7L: 550 |
|      | リークチェック: 11  | 自己洗浄: 452                                            | アルコール単独: 0 | エア単独: 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルタ        |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | カラータッチパネル     |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 31. 4. 19 日

金子クリニック 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店  
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1  
TEL: 025-233-0592

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       |     |