

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 190204

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 新潟支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	木村医院 様			機番	100180
環営	所在地	新潟県長岡市小島谷 3343			納入日	平成 23 年 04 月 21 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 30 年 12 月 25 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 31 年 02 月 05 日

異常履歴・長岡市の最低～最高気温

- 1：光量低下異常 1 (E210)、ランプ切れ異常 (E212) が発生した日
12/11 (0.9～7.0℃)、12/14 (1.8～5.5℃)、12/15 (0.9～4.6℃)、12/21 (2.3～10.7℃)
- 2：異常が発生しなかった日
12/13 (2.3～7.1℃)、12/17 (3.2～8.2℃)、12/18 (2.4～7.0℃)、12/20 (4.2～8.0℃)

不具合原因（故障箇所）と処置予定


光量低下異常を再発させてしまい、大変申し訳ありません。下記ご報告させていただきます。

〔1〕光量低下異常 1 (E210)、ランプ切れ異常 (E212)

オゾン水濃度計の紫外線ランプの点灯状態を監視しており、「ランプの点灯が遅い」または「点灯しない」場合に、この異常が発生します。

工場では再現せず、長岡市の天気や気温との因果関係も強くありませんでした。
このため、濃度計全体と電気系を全て交換しましたので、様子を見てくださいますようお願いいたします。

写真：交換部品一式

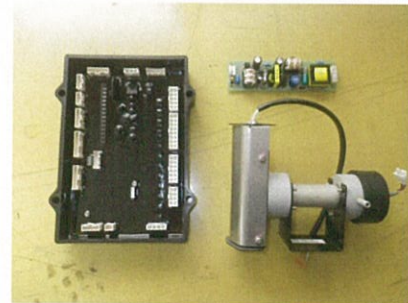

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71 ppm・正常
3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：378 殺菌：1540、殺菌＋アルコール：2637、リークチェック：0
自己洗浄：1400、アルコール単独：0、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	オゾン水濃度計 No.17112897	1 台	パルス：737
2	インバータ基板	1 枚	
3	コントロール基板	1 枚	

承認

若
19.2.25
井

審査

中
19.2.25
澤

作成

H31. 2. 25

中澤

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIパワ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528

2018年12月 長岡市気象グラフ

— 気温(°C) — 降水量(mm) — 降雪(cm)

