

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年12月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300393
作業年月日	平成30年12月6日	作業時間：1.5 Hr
顧客名	ひまわり内科 様	TEL：025-553-1030
所在地	新潟県糸魚川市東寺町1-4-6	ご担当 森田 様
販売店	(株)新潟ムトウ	ご担当 板倉 様
納入年月日	平成27年12月3日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に無し。

不具合原因、作業内容

なし。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 361
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

2000回を超えた為、マニホールド周辺チューブ交換。

装置 情報	交換後運転回数：664	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：1175	殺菌/消毒+7L：889
	リークチェック：0	自己洗浄：701	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 30.12. -6 日

ご署名

森田 英



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者
H30.12.6	H.30.12.6

Ver.3.1