

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和元 年 7 月 16 日

|       |                                                                                                       |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/> | 製造番号：100310                                                           |
| 作業年月日 | 令和元 年 7 月 17 日                                                                                        | 作業時間：1.5 Hr                                                           |
| 顧客名   | 羽尾内科医院 様                                                                                              | TEL：025-532-4031                                                      |
| 所在地   | 上越市三和区下中 677-1                                                                                        | ご担当 羽尾先生 様                                                            |
| 販売店   | (株) ケンブリッジ 上越営業所                                                                                      | ご担当 松永 様                                                              |
| 納入年月日 | 平成 25 年 7 月 24 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6 年 6 回目                       | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                  |                                                           |
| 無し。                                                                              |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                                                       |                                                           |
| 無し。                                                                              |                                                           |
| 点検項目                                                                             |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                  | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 541 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                       | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                   | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/>                                  |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                                        |                                                           |
| 保守点検完了致しました。次回は令和2年7月になります。                                                      |                                                           |

|          |             |                |            |            |
|----------|-------------|----------------|------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：223 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒：1303 | 殺菌/消毒+7L：0 |
|          | リークチェック：1   | 自己洗浄：843       | 7Lコール単独：0  | エア単独：0     |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| ポン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| ポン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| ポン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 7 月 17 日

ご署名

羽尾政清



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店  
新潟県新潟市中央区関屋田町1-5  
TEL：025-233-0592

責任技術者 作業者

R.17/17

R.17/17

