

保守点検・修理 報告書

管理 No. 190806-01
発行日: 2019 年 8 月 6 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.	製造番号 100266
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019 年 8 月 6 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 1.5 Hr
顧客名	大矢医院 様	TEL :
所在地	新潟県小千谷市ひ生乙933-7	ご担当 様
販売店	源川医科器械株式会社 長岡営業所	ご担当 尾坂 様
納入年月日	2011 年 5 月 27 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守の時期の為実施。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルズ数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラム バージョン 正常 ☒ Ver. /
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ございません。	

装置 情報	交換後運転回数: 514	更新 (リセット) 実施 ☒ ・ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 371 /	殺菌/消毒+7L: 287 /
	リークチェック: 1	自己洗浄: 3	7Lコル単独: 13	エア単独: 397

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ: 水槽側	☒	水フィルター	☐
☐			接続コネクタ: チューブ側	☒	マニホールド周辺チューブ	☒
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒	☐	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 8 月 6 日

ご署名 大矢医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL : 025-233-0592

責任技術者	作業者
	