

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190827-01
発行日: 2019 年 8 月 27 日

販売名 / サーマニチュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.	製造番号 100180
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 R 1 年 8 月 27 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 / Hr
顧客名	木村医院 様	TEL: 0258-74-2172
所在地	新潟県長岡市小島谷3343	ご担当 様
販売店	株式会社エム・イー新潟 様	ご担当 佐々木 様
納入年月日	H23 年 4 月 21 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守の時期の為、実施。 (本来は6月でしたが、2018年12月に不具合で2か月ほどお預かりしていた為、2か月延期して8月の実施)	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラム バージョン 正常 ☒ Ver. 0107 / T03D
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 異常ございません。	

装置 情報	交換後運転回数: 674	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 16521	殺菌/消毒+アル: 28211
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1515	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 17052775		
オゾンセンサー	☒	1
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1 年 8 月 27 日
ご署名 涌井 

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	