

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 7 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100310
作業年月日	令和 2 年 7 月 15 日	作業時間：1 Hr
顧客名	羽尾内科医院 様	TEL：0255-32-4031
所在地	上越市三和区下中677-1	ご担当 羽尾先生 様
販売店	(株) ケンブリッジ 上越営業所	ご担当 松永 様
納入年月日	平成 25 年 7 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に無し。

不具合原因、作業内容

特に無し。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 40.2
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

保守点検完了致しました。次回は、令和3年7月になります。

装置情報	交換後運転回数：94	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：1998	殺菌/消毒+7L：0
	リークチェック：1	自己洗浄：982	7L単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

羽尾内科医院
羽尾政清

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者
7/5 田島	7/5 田島

Ver.3.1