

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200123-01

発行日: 2020 年 1 月 23 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.	製造番号 500029
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 1 月 23 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 1.5 Hr
顧客名	はな野医院 様	TEL: 0258-39-3193
所在地	新潟県胎内市築地1851	ご担当 様
販売店	株式会社エム・イー新潟 様	ご担当 佐々木 様
納入年月日	2018 年 11 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守の時期の為、実施。

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302 / 711A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

小物入れ 破損分、交換致しました。
その他 異常ございません。

装置 情報	交換後運転回数: 193	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 114 / 114	殺菌/消毒+7L: 81 / 81
	リークチェック: /	自己洗浄: 0	7Lコル単独: 0	エア単独: 186

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 12081133		
オゾンセンサー	☒	1
小物入れ	☒	1

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ: 水槽側	☐
接続コネクタ: チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 1
エアフィルター	☒ 1
水フィルター	☒ 1
マニホールド 周辺チューブ	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R 2020 年 1 月 23 日
新潟県胎内市築地1851
はなの医院

ご署名

花野 伸一



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者