

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 令和2年9月29日

|       |                                                                                        |      |                                                                  |              |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                            |      | 製造番号                                                             | 500379       |  |
| 作業年月日 | 令和2年9月30日                                                                              |      | 作業時間                                                             | 1 Hr         |  |
| 顧客名   | 渡辺内科医院 様                                                                               |      | TEL                                                              | 025-525-1170 |  |
| 所在地   | 上越市幸町14-9                                                                              |      | ご担当                                                              | 石田 様         |  |
| 販売店   | ナナイ医療器(株)                                                                              |      | ご担当                                                              | 中山 様         |  |
| 納入年月日 | 令和2年9月25日                                                                              | 保証期間 | 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品          |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年1回目           |      | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                    |              |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> |      | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                  |              |  |

|                                                                                  |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                  |                                                                    |
| 特に無し。                                                                            |                                                                    |
| 不具合原因、作業内容                                                                       |                                                                    |
| 特に無し。                                                                            |                                                                    |
| 点検項目                                                                             |                                                                    |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 水槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                       |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                  | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 634          |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                     |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                       |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm           |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                       |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                       | 消毒 チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 水槽側コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                   | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| <input type="checkbox"/>                                                         | 運転プログラムバージョン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0302/T11A |
| 作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項                                                        |                                                                    |
| 点検完了致しました。                                                                       |                                                                    |

|          |                                                                                          |                                |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 198 更新(リセット)実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒(総運転回数): 200 / 消毒(洗剤洗浄あり): 1 |            |
|          | 消毒+アル(総運転回数): 71                                                                         | / 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 71            |            |
|          | リークチェック: 69                                                                              | 自己洗浄: 0                        | アルコール単独: 1 |

| 交換部品名称                   | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 交換・数量                               | 交換部品名称  | 交換・数量                               |
|--------------------------|-------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| オゾン水濃度計                  | <input checked="" type="checkbox"/> |    | オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> | 吸盤      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 交換後 No.                  |                                     |    | 排水栓           | <input checked="" type="checkbox"/> | エアフィルター | <input type="checkbox"/>            |
| オゾンセンサー                  | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ; チューブ側 | <input type="checkbox"/>            | 水フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |                                     |    | オゾン水濃度計用フィルタ  | <input type="checkbox"/>            |         | <input type="checkbox"/>            |
|                          |                                     |    |               | <input type="checkbox"/>            |         | <input type="checkbox"/>            |

## お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

R2年 9月 30日

石田 洋美



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店  
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1  
TEL: 025-233-0592

|         |         |
|---------|---------|
| 責任技術者   | 作業者     |
| R2.9.29 | R2.9.29 |
|         |         |