

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 201001

配 布 先	納 入 先	新鋭工業 株式会社 新潟支店 殿			機 種	O E D - 1 0 0 0
客先	1	顧 客 名 プラーカ中村クリニック 様			機 番	1 0 0 3 0 8
環営	1					
環品	1	所 在 地 新潟県新潟市中央区笹口 1-1			納 入 日	2012 年 11 月 29 日
		点 検 者 中澤一裕 作業時間			受 付 日	2020 年 7 月
		返 送 先 納入先と同じ			出 荷 日	2020 年 09 月 28 日
計	3					

不具合内容・依頼内容

オゾン水生成注意 (E110)
オゾン水生成異常 (E207)

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 異常内容につきまして

オゾン水の生成時間が規定値（6分）を超えると発生します。
主な原因は機械の故障や使用環境（水質、水温、有機物、酸素）などが考えられます。

[2] 点検結果・作業内容

運転条件を振って確認しましたが、故障箇所や異常はありませんでした。
夏場は水温が高く、オゾン水濃度が上がりにくい環境なので、上記の要因が複合して異常が発生したと推察いたします。念のためにオゾン水循環系の部品を交換しました。

写真：交換部品一式



[2] 作業内容

- 1：部品交換・・・下表と写真を参照ください
- 3：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm・・・正常
- 4：運転確認・・・正常
- 5：装置情報

交換後運転回数：950 殺菌：15716、殺菌＋アルコール：4153、リークチェック：3
自己洗浄：2060、アルコール単独：128、エア単独：3

交換部品

部品種類	部品名称	数量	備考
	アスピレータ	1 個	チューブ含む
	オゾン水濃度計フィルタ	1 枚	

承認



審査



作成

R02. 10. 1

中澤

（株）IHI アグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528