

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200417-01
発行日: 2020 年 4 月 17 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.	製造番号 300814
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 4 月 17 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 / Hr
顧客名	金子クリニック 様	TEL: 025-799-2015
所在地	新潟県魚沼市田尻164-2	ご担当 様
販売店	株式会社東京ダイヨー 様	ご担当 横山 様
納入年月日	2016 年 3 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守の時期の為、実施。			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検実施。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ございません。			

装置 情報	交換後運転回数: 144	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 42 /	殺菌/消毒+7L: 674 /
	リークチェック: 11	自己洗浄: 572	アルコール単独: 0	エア単独: 14

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	3
交換後 No.			排水栓	☒	1	エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☒	2	水フィルター	☐	
☐			接続コネクタ; チューブ側	☒	2	マニホールド	☐	
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1	周辺チューブ		

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	2.4.17
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	金子 一 郎
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
坂井	坂井
R2.4.17	