

点検・修理報告書

管理 No. 210618
発行日：2021 年 11 月 10 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 10 月 20 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	小松こども歯科 様		TEL： 022-220-1660
所在地	宮城県富谷市明石台2-22-1		ご担当 様
販売店	ササキ(株)仙台支店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100036	運転回数： 2948
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー8 循環水圧低下		
・洗剤供給不良、扉パッキン不良		
原因		
・循環水圧を検知する圧力センサーの故障		
処置、作業内容		
・循環水用圧力スイッチを交換しました。		
・洗剤の本体側ジャックが破損していたので交換しました。		
・扉パッキン挟み込みで変形しておりましたので交換しました。		
特記事項		
・各種点検・清掃・運転確認実施		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環水用圧力スイッチ		1		
2	洗剤 本体接続端子ジャック		1		
3	扉パッキン上下セット		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 19 日

ご署名 小松 俊二



修理業者
株式会社 IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '21/10/29	富田 '21/10/20	安田 '21/10/20