

保守点検・修理 報告書

管理 No. 100368

発行日：平成30年 6 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 300392
作業年月日	平成 30 年 6 月 18 日	作業時間： 3.5 Hr
顧客名	大淵内科クリニック 様	TEL： 025-752-7155
所在地	新潟県十日町中条甲1096番地2	ご担当 様
販売店	カナイ医療器(株) 長岡営業所 様	ご担当 酒井 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 26 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル動作不良（電源はきているが反応せず）

不具合原因、作業内容

タッチパネル交換（カラーへ変更）

定期保守部品交換、マニホールド周辺チューブ交換

各部点検・清掃

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タッチパネル動作良好。

下記の装置情報は平成28年12月20日（定期メンテ時）の値になっております。（データを抽出できなかった為）

装置情報	交換後運転回数： 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 804	殺菌/消毒+7L： ###
	リークチェック： 2 自己洗浄： 844	7Lコール単独： 3	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	カラータッチパネル		☒	1

お客様ご確認署名欄

年 30.6.29 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

医療法人社団 大淵内科クリニック

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者

作業者

