

保守点検・修理 報告書

管理 No. 210216-01
発行日: 2021年 2 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100048
作業年月日	2021 年 2 月 16 日		作業時間: / Hr
顧客名	いとうクリニック 様		TEL: 0256-32-5350
所在地	新潟県三条市林町1-20-28		ご担当 様
販売店	株式会社バイタルネット 様		ご担当 様
納入年月日	2010 年 9 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守の時期の為実施。			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検実施。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルズ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ございません。			

装置 情報	交換後運転回数: 1235 /09 更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 3 /235	殺菌/消毒+7L: 3
	リークチェック: 2	自己洗浄: 1185	7L単独: 0 エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	カラータッチパネル		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 2 月 16 日

新潟県三条市林町1-20-28
いとうクリニック

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者