

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210423-01
発行日: 2021 年 4 月 23 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.	製造番号 300814
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 4 月 23 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 / Hr
顧客名	金子クリニック 様	TEL: 025-799-2015
所在地	新潟県魚沼市田尻164-2	ご担当 様
販売店	(株)東京ダイヨー器械店 様	ご担当 横山 様
納入年月日	2016 年 3 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守の時期の為、実施。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0207 / T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ございません。	

装置 情報	交換後運転回数: 142	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 611	殺菌/消毒+7L: 697 /
	リークチェック: 11	自己洗浄: 694	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 129

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1
交換後 No. 52001005	1
オゾンセンサー	☒ 1
☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
マニホールド	☐
周辺チューブ	

お客様ご確認署名欄

2021 年 4 月 23 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名  印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
坂井	坂井
R3.4.23	