

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

10-06456

No. 210409

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 新潟支店 殿		機種	OED-1000S Plus
客先	顧客名	あきはクリニック 様		機番	500516
環営	所在地	新潟県新潟市秋葉区新津 5149-11		納入日	2020年04月02日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2021年03月08日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	2021年04月05日

## 修理依頼・不具合内容

タッチパネルが「IHI」画面で先に進まない

## 不具合原因（故障箇所）と処置

この度は不具合を起こしてしまい大変申し訳ございませんでした。下記の通りご報告いたします。

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

フタロックのソレノイドが故障し、基板とタッチパネルに波及しておりました。  
ソレノイドの初期不良が原因でしたが、波及した部品を全て交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



### [2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 $0.7 \pm 0.2$ ppm）：0.74 ppm・正常
- 3：出荷時の装置情報  
消毒：147/15、消毒+アルコール：353/122、リークチェック：341  
自己洗浄：207、アルコール単独：1、エア単独：7

## 交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	フタロックソレノイド	1個	
2	コントロール基板	1台	
3	タッチパネル	1枚	

(株) IHI アグリテック (旧社名 IHIパワラ)

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1

承認	松永
責任技術者	中澤
作成	R03.4.09 中澤