

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼
番号

10-06457

No. 210416

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 新潟支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	新潟県立妙高病院 様		機番	300082
環営	所在地	新潟県妙高市大字田口 147-1		納入日	2014年05月29日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2021年03月09日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	2021年04月12日
計					

修理依頼・不具合内容

タッチパネル消灯後、通電しない

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

電源が入らない状態を確認しました。
直流電源およびタッチパネルが故障しており、これを交換して復旧いたしました。
基板もダメージを受けた可能性があるため交換しました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・写真と下表をご参照ください
- オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.70 ppm ・ 正常
- 出荷時の装置情報
消毒 : 1821、消毒+アルコール : 2429、リ-チェック : 16
自己洗浄 : 1201、アルコール単独 : 12、エア単独 : 9

承認
松 21.04.16 永
責任技術者
中 21.04.16 澤
作成
R03. 4. 16 中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	タッチパネル	1台	
2	直流電源	1台	
3	コントロール基板	1枚	
4	アルコールタンクキャップ	1枚	

(株) IHI アグリテック (旧社名 IHIパウラ)

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1