

保守点検・修理 報告書

管理 No. 211022-01
発行日: 2021 年 10 月 22 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3. オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 100628 作業年月日 2021 年 10 月 22 日 作業時間 / Hr
顧客名	窪田医院 様	TEL: 0258-39-3193
所在地	新潟県長岡市三和1-3-27	ご担当 様
販売店	株式会社マルタケ 長岡店 様	ご担当 八子 様
納入年月日	2013 年 8 月 6 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期保守の時期の為、実施。

不具合原因、作業内容
定期保守点検実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / 701.A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
異常ございません。
鉗子口接続チューブがゴム劣化の為、後日お持ち致します。

装置情報	交換後運転回数: 743	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌/消毒: 26431	殺菌/消毒+7L: 4540 /
	リークチェック: /	自己洗浄: 23/2	7Lコル単独: 77	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 10120510			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☒ 2	水フィルター	☐
	☐		接続コネクタ; チューブ側	☒ 2	マニホールド	☐
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	周辺チューブ	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 22 日

ご署名 窪田医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	