

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 小山貴之

点検年月日	21 年 9 月 15 日	機種名	ONW-10	製造機番	1334
設置場所	内視鏡室			TEL	
納入年月日	年 月 日	運転回数		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.6 % 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.120~0.206 MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	インジケータによって 色の変わりが悪い物が あります。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21 年 9 月 15 日

ご署名 友野 寛二

㊞

*: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。