

点検確認書

異音が発生する

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 21年 9月 17日	機種名	ONW-10	製造機番	000993
設置場所	1F検査室横			TEL : 0868-36-3311	
設置時期	平成 18年 3月 27日	使用時間	2608回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☒ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☒ 定流量弁清掃 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度 : 91.3 % 流量 : 0.74 L/min 圧力 : 0.134~0.228 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	6回運転して異音は出まじでいた 3台ある水ポンプのうち 水ポンプ交換ポンプ(P-1)が劣化 し始めているので、交換をご検討下さい。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21 年 9月17日

ご署名

山本 麻衣 (印)

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。