

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤 裕 (印)

点検年月日	平成 21 年 10 月 1 日	機種名	ONW-10	製造機番	000993
設置場所	1 F 検査室横			TEL : 0868-36-3311	
設置時期	平成 18 年 3 月 27 日	使用時間	2633 回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 給水流星改善
給水	正常	☒	調整	☒ 配流管 SV4 側
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 配管入取去
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生 (9/17 計測)	正常	☒	濃度 : 91.3% 流量 : 0.74L/min 圧力 : 0.134~0.228MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	わが水製造ポンプを交換しました。 今後大きな異常が発生するか 様子を見て下さい。 また点検部品の交換もご検討下さい。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
オゾン水製造ポンプ P-1	一台	
(ハット 60° 取り)		

21 年 10 月 1 日

ご署名 里 穀 由美子 (印)

※ : 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。