

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：

中澤-裕

点検年月日	平成 21年 12月 21 日	機種名	ONW-10	製造機番	001246
設置場所	1F検査室			TEL : 086-956-0505	
設置時期	平成 18年 9 月 22 日	使用時間	1760回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整 ☒ ヒンジ	交換 ☐
給水	正常	☒	調整 ☒ 定流量弁	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 04 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		0.103
酸素発生	正常	☒	濃度：94.3% 流量：0.81 L/min 圧力： ~0.193 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃 ☐	
内部	正常	☒	清掃 ☒ 排気ホース	
洗浄コネクタ } FTS 修正	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
洗浄チューブ }	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	異常ありません。
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
	交換 ☐		

21 年 12 月 21 日

ご署名

上野 芳樹

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。