

点検確認書

エラ-H、排水異常対応

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

定期点検 2年目実施

点検担当者:新築大倉、IHI中澤

点検年月日	平成 22年 8月 5日	機種名	ONW-10	製造機番	000306
設置場所	1F 検査室			TEL :	0868-22-8251
設置時期	平成 15 年12月 17日	運転回数	CNT 5704	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☒	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☒	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☒
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度 : 93.8 %	流量 : 0.78 L/min	圧力 : 0.112~0.196 MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	排水ホース内に異物が詰まって エラ-Hが止まりました。約7年の使用で 性能も低下しており、交換しました。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
排水ホース P-3	交換 ☒	一巻	

年 月 日

ご署名 池口 智恵子

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。