

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 21年 8月 25日	機種名	ONW-10	製造機番	001042
設置場所	1F 内視鏡室			TEL : 0877-32-2635	
設置時期	平成 18年 2月 21日	使用時間	CNT 596	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整 ☒ ヒーティングスプリング	交換 ☐
給水	正常	☒	調整 ☒ 流量調整	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整 ☒ 排気ダクト清掃	交換 ☐
排水	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 : 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☒	濃度 : 92.6 % 流量 : 0.78 L/min 圧力 : 0.136 ~ 0.233 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃 ☐	
内部	正常	☒	清掃 ☒	
洗浄コネクタ	正常	☐	調整 ☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整 ☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	異常ありません
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

ご署名 氏家 裕三

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。