

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕

|       |                |      |                |      |       |
|-------|----------------|------|----------------|------|-------|
| 点検年月日 | 平成20年 10月 30 日 | 機種名  | ONW-10         | 製造機番 | 00202 |
| 設置場所  | 2F 内視鏡室 EVあり   | TEL  |                |      |       |
| 設置時期  | H15.9.26       | 使用時間 | 119 7/28より706回 | 御対応者 |       |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |           |                                     |
|------------|------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |           |                                     |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| ランプ類       |      |                                     |           |                                     |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄動作       |      |                                     |           |                                     |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |           |                                     |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 濃度:       | mg/L                                |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                     |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 94.1% | 流量: 0.7 L/min 圧力: 0.123~0.204 MPa   |
| 水漏れ確認      |      |                                     |           |                                     |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |
| 清掃         |      |                                     |           |                                     |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃        | <input type="checkbox"/>            |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整        | <input type="checkbox"/>            |

| 交換部品     | 数量 | コメント                                                                                     |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 吸着筒      | 一式 | 異常音と共振音が元<br>・共振音はネジで増席して止めました。<br>・異常音は再取しませんでした。<br>水ポンプから発生したと思われる。<br>今後再発するようにして交換で |
| 吸湿筒      | 一式 |                                                                                          |
| ドレン用フィルタ | 一個 |                                                                                          |
| オゾン分解触媒  | 一個 |                                                                                          |
|          |    | 年 月 日 中澤 裕                                                                               |
| ご署名      |    | 小坂田 崇海 印                                                                                 |