

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者:

中澤-裕 (中沢)

点検年月日	平成 22年 2 月 19 日	機種名	ONW-10	製造機番	000110
設置場所	1 F 内視鏡室			TEL : 086-455-9009	
設置時期	平成 15年 4月 10日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアページ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 : 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		0.090
酸素発生	正常	☒	濃度 : 94.1 % 流量 : 0.76 L/min 圧力 : ~0.167 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	異常ありません。 スコープの水切れも問題あり ませんでした。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

ご署名

中沢

(中沢)

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。