

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

「インジケター要点検」対応

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 22年 2月 3日	機種名	ONW-10	製造機番	000110
設置場所	1F 内視鏡室			TEL : 086-455-9009	
設置時期	平成 15年 4月 10日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.5	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒	88.2～	0.123		
酸素発生	正常	☒	濃度：90.2%	流量：0.76	L/min	圧力：～0.212 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☐	フィルタ - 清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	インジケターの変色は正常範囲内でしたが、酸素濃度に低下が見られるので、定期交換が必要で。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

22年 2月 3日
ご署名 村岡加代子

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。