

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

水漏れ対応

点検担当者：中澤 裕

点検年月日	平成 22年 6月 21 日	機種名	ONW-10	製造機番	00056
設置場所	1 F 内視鏡室			TEL	086-902-2211
設置時期	平成 15 年 1月 10日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☒	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	未実施	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒	2回運転			
酸素発生	正常	☐	濃度：	%	流量：	L/min 圧力： MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
下部フィルター	交換	☒	一個	水漏れの原因は下記でした。 ①(木)：下部フィルター変形による シール性能低下 ②(月)：水槽キャップパッキンの外れ
パッキン	交換	☒	一枚	
	交換	☐		
	交換	☐		
	交換	☐		
	交換	☐		

水槽キャップ パッキン パッキン 下部フィルター



(追加) (交換)

下部フィルター

ご署名

中澤 明美

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。