

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 23 年 12 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100061
作業年月日	平成 23 年 12 月 20 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	近藤クリニック		TEL:	0867-28-3233
所在地	岡山県久米郡久米南町下弓削389-1		担当	様
販売店	五洋医療器(株)		担当	様
納入年月日	平成 22 年 12 月 20 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1 年 / 回目	
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☒		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

- ・ 定期保守点検実施
- ・ 酸素が 2MPa (赤い部分) なので説明の上交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 696
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 176 → 0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 43	殺菌+アル: 133
	リークチェック: 1	自己洗浄: 124	アルコール単独: 0
			エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒				☐	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 23 月 12 20 日
岡山県久米郡久米南町下弓削389-1
近藤クリニック 近藤正得

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

