

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 23年 12月 6 日	機種名	ONW-10	製造機番	:001578
設置場所	1 F 内視鏡室			TEL	: 087-894-0001
設置時期	平成 20年 3月 26日	運転回数	870	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.3 % 流量: 0.77 L/min 圧力: 0.134~0.232MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	排水ホス 清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒 } 次回以降	交換 ☐	総合点検2年目2回目実施 異常ありませんでした。
吸湿筒 } に交換予定	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	
オゾン分解触媒	交換 ☐	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

平成 23 年 月 日

ご署名 福井美恵

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。