

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 8 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100075
作業年月日	平成 24 年 8 月 30 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	佐藤病院		TEL: 086-263-6622
所在地	岡山県岡山市南区築港栄町2-13		担当 様
販売店	西日本メディカルリンク(株)		担当 東 様
納入年月日	平成 22 年 8 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 339
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 51970	更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 250	殺菌+アル: 646
	リークチェック: 1774	自己洗浄: 440	アルコール単独: 152	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		殺菌槽コネクタ		☒	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
14 24 年 8 月 30 日 岡山市南区築港栄町2番13号 西署 佐藤病院 明芳会	

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	