

勝北診療所 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

定期点検・エラー6 (PSA異常) 対応

点検担当者: 中澤 裕

点検年月日	平成 24 年 11 月 2 日	機種名	ONW-10	製造機番	: 001410
設置場所	×線テレビ室	IF		TEL	: 0868-29-2324
設置時期	平成20年8月20日	運転回数	915	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☒ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒	3回実施	
酸素発生	正常	☒	濃度: 93.1 % 流量: 0.76 L/min 圧力: 0.129~0.218MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒ 排水ホース、定流量弁、ドレナート
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☒ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	1	エラー6は再現しませんでした。 機器の故障ではなく、ドレナート またはドレフィルタの詰まりが 考えられ、これを清掃、交換しました。
ドレンフィルタ	1	
洗浄コネクタパッキン	1	
(消失していたので)		
取り付けました。		

定期点検の結果
異常ありませんでした。

平成24年 11 月 2 日

ご署名 勝北診療所

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。