

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 / 月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100061
作業年月日	平成25年 / 月23日, 25日	作業時間: Hr
顧客名	近藤クリニック	TEL: 0867-28-3233
所在地	岡山県久米郡久米南町下弓削389-1	担当 様
販売店	五洋医療器(株)	担当 木南戸 様
納入年月日	平成22年 / 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 665
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 17270 更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌: 75	殺菌+7L: 273
	リークチェック: 1	自己洗浄: 252	アルコール単独: 0
		エア単独: 2	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用効果薬		☒	1	大視鏡接続ケーブル		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計ケーブル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 25.11.25 日

岡山県久米郡久米南町下弓削389-1

ご署名 近藤クリニック 近藤正得

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者 作業者

