

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 4 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100262	
作業年月日	平成24年 4 月 26 日		作業時間	1.2 Hr	
顧客名	津山 第一病院		TEL	0868-28-2211	
所在地	岡山県津山市中島438番地		担当	様	
販売店	(株)津山エムアイ		担当	国米 様	
納入年月日	平成23年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

○定期保守点検完了

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 502
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 623	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 456	殺菌+アル: 171
	リークチェック: 96	自己洗浄: 69	アルコール単独: 29	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24 年 4 月 27 日

ご署名 井上 富弥江



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者 作業者

