

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成24年12月19日	機種名	ONW-10	製造機番	:001578
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	: 087-894-0001
設置時期	平成20年 3月 26日	運転回数	1011	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
ランプ類				
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄動作				
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input checked="" type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
性能確認				
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 93.6 % 流量: 0.77 L/min 圧力: 0.132~0.229 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
清掃				
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>	
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>	
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 <input type="checkbox"/>		総合点検3年目 2回目実施 異常ありませんでした。
吸湿筒	交換 <input type="checkbox"/>		
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	1	
オゾン分解触媒	交換 <input type="checkbox"/>		
定期点検ミール	交換 <input checked="" type="checkbox"/> 追加	1	
	交換 <input type="checkbox"/>		

平成24年 12月 19日

香川県さぬき市志度870番地2

ご署名 伊藤 浩一 江崎医院



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。