

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25年 8月 22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100330
作業年月日	平成 25年 8月 22日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	もりの木おおにしクリニク		TEL: 0875-25-3291
所在地	香川県観音寺市茂西町		担当 様
販売店	四国医療器株式会社		担当 白井 様
納入年月日	平成 23年 8月 9日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
☒ 出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 393
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 69 → 0	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 12	殺菌+7L: 133
	リークチェック: 12	自己洗浄: 135	7Lコル単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
H25年 8月 22日	
ご署名 森田 佳代子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	