

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20110804

発行日 平成 24年 12月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100073	
作業年月日	平成24年 12月 13日		作業時間:	1.5	Hr
顧客名	青山医院		TEL:	0868-74-2005	
所在地	岡山県美作市福本549		担当	様	
販売店	(株)津山医研		担当	光後	様
納入年月日	平成 22年 6月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

通電しても動かない

不具合原因、作業内容

タッチパネルが故障しており、交換しました。
交換後3回運転確認して異常ありませんでした。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ 未実施	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 302
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タッチパネルはホカに送り、運転回数などのデータが復旧
できるかどうか調査します。

装置 情報	交換後運転回数:	更新(リセット)実施・未実施	殺菌:	殺菌+アル:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		タッチパネル		☒	1
排水栓		☐		今回無償		☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H24年 12月 13日

署名 青山重男



修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者



H24.12.13

中澤-裕