

い どうアリエツ 御中

メ-カー 控

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

1029-30-10

点検年月日	平成 28年 7月 18日	機種名	ONW-10	製造機番	000709
設置場所	2F 内視鏡室			TEL:	086-221-5010
設置時期	平成 17年 5月 20日	運転回数	7013	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☐	交換	☒ 要交換
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未実施	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 9.7 %	流量: 0.80 L/min 圧力: 0.130~0.216 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	・新装 蛍光灯の点検 (要交換) ・トレイ 破損 (要交換) ・お進めします 1度 オペレータの点検を お進めします (0.05~1.000 S 100% フロント 検定)
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	
オゾン分解触媒	交換 ☐	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

ご署名

後藤 研一



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。