

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 11 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号 : 100370
作業年月日	平成 25 年 11 月 6 日	作業時間 : 1 Hr
顧客名	中島病院	TEL :
所在地	岡山県津山市田町 122	担当 様
販売店	株式会社メディックス	担当 中江 様
納入年月日	平成 24 年 6 月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期点検保守実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 442
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

トレイにヒビが入っています。

装置 情報	交換後運転回数 : 1770	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌 : 2045	殺菌+アル : 1442
	リークチェック : 1	自己洗浄 : 391	アルコール単独 : 1	エア単独 : 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2013 年 11 月 6 日

ご署名 長石 裕子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者

作業者

