

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 12 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100619
作業年月日	平成 25 年 12 月 10 日	作業時間: 2.5 Hr
顧客名	ほかま医院	TEL: 086-542-6616
所在地	岡山県浅口市金光町占見新田 1166-1	担当 様
販売店	坪井医療器株式会社	担当 坪井宏樹 様
納入年月日	平成 24 年 12 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常ありと記入しました。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 450
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☒
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	
正常動作を確認致しました。	

装置情報	交換後運転回数: 199	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 11	殺菌+7L: 191
	リークチェック: 1	自己洗浄: 135	アルコール単独: 3	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホソレ分岐器		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用ガラス		☐	1			☐	
オゾンセンサ		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄	25 年 12 月 10 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	坪井宏樹 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
(印)	(印)